


Emparejamiento Bluetooth®

Guía rápida

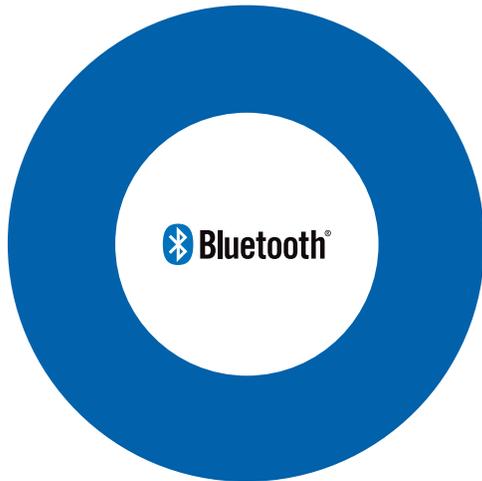

GLUCOCARD®

Lea esto primero

- Visite datamanagement@arkrayusa.com para descargue la aplicación móvil de manejo de datos compatible.
- Es posible que algunos teléfonos inteligentes, especialmente los que no han sido evaluados o aprobados por el fabricante, sean incompatibles con su medidor.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del medidor y los teléfonos inteligentes.
- Para garantizar un uso seguro y correcto, lea el manual del usuario del medidor antes de usar el dispositivo.

Consejos para el uso de Bluetooth®

- Para evitar problemas al conectar su medidor con un teléfono inteligente, acerque los dispositivos entre sí.
- Asegúrese de que el medidor y el otro dispositivo Bluetooth® estén dentro del alcance de la conexión (32 pies [10 metros]).
- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el medidor y el teléfono inteligente. Si hay obstáculos entre los dispositivos, puede que se reduzca la distancia de funcionamiento.

Emparejamiento de su medidor con la aplicación móvil compatible

1. Abra la aplicación en su dispositivo móvil (por ejemplo, un teléfono inteligente).
2. Asegúrese de que el medidor y el dispositivo móvil estén dentro del alcance de la conexión (32 pies [10 metros]).
3. Inicie el modo de emparejamiento Bluetooth® de su medidor mediante uno de los dos métodos siguientes:
 - a. Tome una lectura de glucosa en sangre. Cuando termine de tomar la lectura, saque la tira; esto pondrá automáticamente al medidor en modo de emparejamiento Bluetooth®... o bien,
 - b. Mantenga oprimido el botón de flecha a la derecha del medidor durante 3 segundos. Esto colocará a su medidor en modo de emparejamiento Bluetooth®.
4. Parpadeará el icono de Bluetooth®, para indicar que su medidor está en el modo de emparejamiento Bluetooth®.
5. Siga las instrucciones de emparejamiento de la aplicación en el dispositivo móvil que esté emparejando con su medidor.



La marca de palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de tales marcas por parte del fabricante se hace en virtud de una licencia.

Servicio técnico de atención al cliente de ARKRAY:
800.566.8558, 24 horas del día, 7 días de la semana.

En caso de emergencia, comuníquese con su profesional de la salud o el personal de respuesta médica de emergencia.

Distribuido por:

ARKRAY USA
8260 NW 27th St, Suite 403
Miami, FL 33122 USA

Apoyo de EE. UU.

800.566.8558
www.arkrayusa.com

©ARKRAY USA, Inc. Reservados todos los derechos.
N.º de ref.: 5526-03; Rev. 06/25
PGUAB-0000015 Rev3 06/2025